

視界すっきり!



# 飛沫対策品 低反射 フェイスシールド メガネ型



★光の映り込みによる「反射」や呼気等によるシールドの「くもり」を低減したハイブリット型のフェイスシールドです

## 特長

- ①乱反射を軽減 様々な光の映り込みを軽減
- ②両面曇り止め加工(防曇機能)
- ③あごカーブ形状による飛沫の飛散低減・呼気の侵入低減
- ④環境負荷低減素材使用(シールド部分のみ)

飛沫の飛散状況を  
動画で確認!



飛沫飛散動画

高感度カメラ\*による  
可視化映像

\*レーザー光線によって微細な粒子を  
可視化できるカメラのことで

## ◆低反射

光の映り込みが少なく、視界が良好になります

全光線透過率98%以上 (参考 A-PETの透過率:約90%) ※本データは測定値です 保証値ではありません

一般タイプ




低反射タイプ



## ◆防曇機能

シートの両面に曇りにくい  
加工をしています

防曇試験イメージ

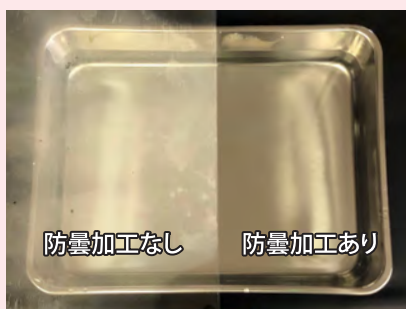

\*未コートA-PETシートと低反射防曇A-PET  
シートを並べてセットし、真下に50℃の  
お湯を置き、60秒後の状態を撮影


## ◆あごカーブ形状

あご下部分までカバーする形状で  
飛沫の飛散・呼気の  
侵入を低減します

ここがポイント!!

立体的に組立てて  
あご下までカバー!

\* 実用新案及び意匠出願中

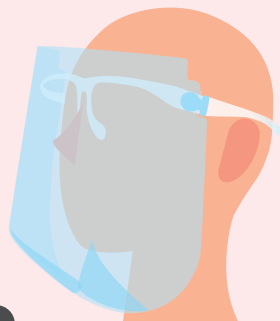

対面相手の呼気の侵入映像



あごストレートタイプ




あごカーブタイプ

高感度カメラ\*による可視化映像 \*レーザー光線によって微細な粒子を可視化できるカメラのことで

## ⚠️ご使用上の注意


- 飛沫感染予防以外の目的では使用しないでください。
- 空気中の微細な飛沫、粉塵などの吸込み防止にはマスクを使用してください。
- 本製品は非滅菌品です。
- シールド及びフレームのエッジで手を切らないよう注意して取り扱いください。
- 強い力を加えたり、落下させるとシールド及びフレームが割れる恐れがあります。
- 割れた製品、切れ目の入った製品は使用しないでください。
- 極端に高温、低温になるところや、直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 高温多湿環境下に長期間保管すると品質劣化の可能性がございます。
- 長期間保管した製品で、使用前または使用中に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 皮膚に異常がある方はご使用をお控えください。
- 本製品のご使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした時や気分が悪くなった時は使用を中止し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 装着後、一度外されたシールドは再利用せず、廃掃法及び地方自治体の条例にしたがって廃棄してください。
- 汚れた場合は新しいシールドに交換してご使用ください。
- コート剤の特性上、塗布面が白く見えることがあります。また、光の角度によって、反射する光に色が付いて見えることがあります。
- シールドは単回使用を想定しているため、水、アルコール、酸性の液体等で拭く、もしくは噴霧することは避けてください。またシールド及びフレームを加熱しないでください。  
※コート剤が脱落、もしくは変性することで皮膚、眼、気管に影響する可能性があります。
- フレームは繰り返し使用を想定しています。洗浄が必要な場合は中性洗剤、アルコールをご使用ください。
- 成形加工の特性上、フレームが黄味がかったり、気泡が含まれることがあります。
- 付属のフレーム以外のフレームをご使用の場合、取り付け、可動に不具合が生じる場合があります。
- 改良等のため、製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

## パーツ名称

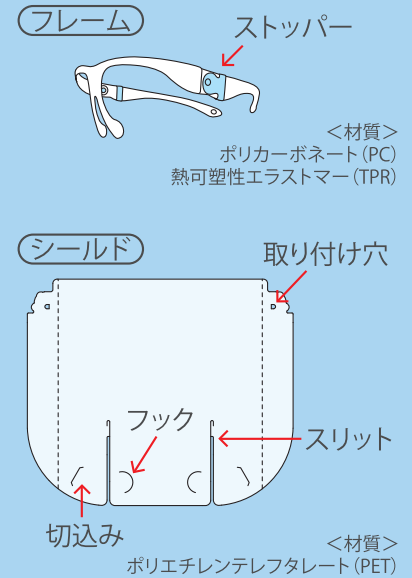


## 組立方法


①フレームのストッパーを外す

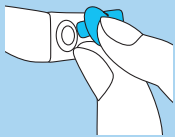



②シールドの取り付け穴を開ける

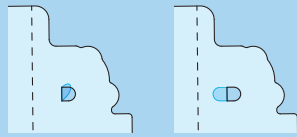

③シールドとフレームの穴位置を合わせる

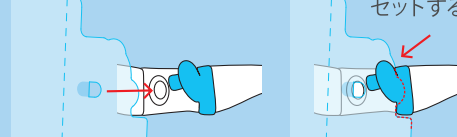


④ストッパーを差し込みしっかりと押さえる

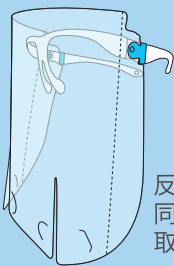
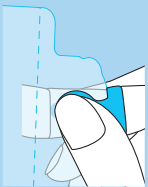


⑤あご部分を組立てる

スリットの両側を重ね合わせフックを切込みに差し込む

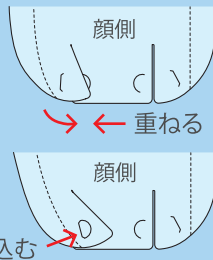

両側のフックを差し込み立体的に組立てる

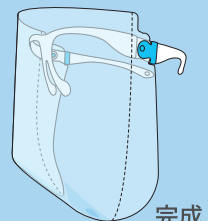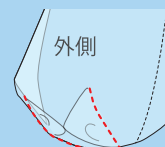


## シールドの仕様

● バイオ A-PET ● サイズ:幅 250mm × 高さ 213mm × 厚み 0.2mm ● 重さ:13.2g/枚


## 梱包仕様

● 低反射防曇シールド 100枚・メガネ型フレーム 100個セット

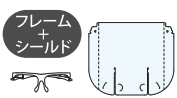

外箱 段ボール外寸:縦 258mm × 横 554mm × 高さ 280mm  
(シールド 10枚・フレーム 10個入り小箱) × 10箱  
\*シールド 5枚 / 1袋 フレーム 5個 / 1袋にて個包装

小箱 段ボール外寸:縦 240mm × 横 267mm × 高さ 52mm

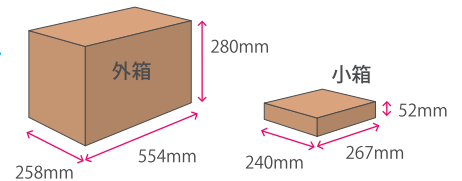


交換用  
どうぞ!

● 低反射防曇シールド 100枚セット



外箱 段ボール外寸:縦 240mm × 横 325mm × 高さ 40mm  
(シールド 10枚入り厚紙封筒) × 10封  
\*シールド 10枚 / 1袋にて個包装

厚紙封筒 縦 220mm × 横 310mm × 厚み 3.2mm

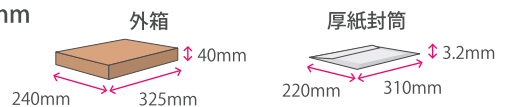

販売代理店  
東京恒和インターナショナル株式会社  
〒134-0081  
東京都江戸川区北葛西5-17-4 ファーストビル1階  
TEL.03-5676-0931 FAX.03-5676-0933

ご注文方法: ホームページよりご注文をお願いします  
URL <http://www.tokyokowa-inter.co.jp/>  
Email [info@tokyokowa-inter.co.jp](mailto:info@tokyokowa-inter.co.jp)

